

Pour des patients heureux



tcs®
Authorized Distributor
FRANCE

Prothèse amovible flexible et esthétique

Les prothèses flexibles sont très demandées par les patients qui recherchent toujours plus de confort et d'esthétisme. Pour répondre à cette demande, **TCS France** vous propose un matériau de grande qualité pour des **patients satisfaits**.

UNE CONNAISSANCE PARFAITE DE NOTRE PRODUIT

Distributeur exclusif en France des produits TCS® depuis 2015, nous équipons, formons et accompagnons un réseau de laboratoires certifiés TCS France.

Notre équipe technique est composée de **prothésistes dentaires hautement qualifiés** et spécialisés dans la fabrication de prothèse flexibles.

Nous sommes **à votre écoute** pour répondre à toutes vos **questions relatives aux prothèses flexibles**, mais aussi:

- Un support technique efficace
- Une présentation des produits TCS®
- Des commandes d'accessoires d'ajustements au fauteuil



01.82.28.40.93

06.21.15.20.82

contact@tcsfrance.com

NOTRE RÉSEAU DE LABORATOIRES CERTIFIÉS TCS FRANCE

Le choix du laboratoire est primordial pour le succès d'une prothèse flexible et l'assurance d'un **travail de qualité**. Choisir un **laboratoire certifié TCS France**, c'est la garantie d'un travail professionnel, respectant un **protocole rigoureux**. Des **formations** sont réalisées régulièrement afin de maintenir un niveau de **qualité haut de gamme**.

www.tcsfrance.com

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Unbreakable™ par TCS®

DES MILLIONS DE PROTHÈSES TCS® UNBREAKABLE™ ONT ÉTÉ FABRIQUÉES DANS LE MONDE



Introduite sur le marché en 2000, la prothèse **TCS® Unbreakable™** a rapidement gagné en **popularité dans le monde entier**.

TCS® Unbreakable™ est un nylon **extrêmement résistant** et de haute performance spécifiquement formulé pour la fabrication des prothèses dentaires partielles amovibles.

Ce **système innovant** fournit au patient un appareil confortable, tenace, incassable, esthétique et **indétectable dans la bouche**.

ADJONCTION DE DENTS ET CROCHETS, C'EST POSSIBLE !

Le **TCS® Unbreakable™** est un polyamide de **classe IIa** doté de caractéristiques exceptionnelles:

- **Adjonctions de dents et crochets**
- Léger et confortable
- Esthétique
- Durable
- Garantie Incassable
- Disponible en quatre teintes de gencive



LES PROTHÈSES TCS[®] PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES CHAQUE FOIS QU'UNE PROTHÈSE DENTAIRE AMOVIBLE EST RECOMMANDÉE.

- Patients ayant des exigences esthétiques à moindre coût.
- Patients ne souhaitant pas d'armature métallique.
- Facettes gingivales pour masquer les surfaces racinaires exposées.
- Patients allergiques aux monomères et au nickel.
- Restauration de transition idéale durant la période de cicatrisation des implants.
- Présence d'excroissance.
- Cancer de la bouche et fente palatine.

Ne vous limitez pas à ces indications. Tout au long de sa relation avec les techniciens dentaires et les dentistes, TCS[®] a appris que, parfois, même la prothèse amovible la plus «impossible» peut être fabriquée avec succès.

DANS CERTAINS CAS, L'ASSOCIATION D'UNE ARMATURE MÉTALLIQUE EST RECOMMANDÉE:

- Besoin d'un appareil plus rigide à cause du faible soutien tissulaire ou du faible nombre de dents restantes.
- Selle à extrémité libre avec des dents manquantes depuis la première prémolaire.
- Fonte du siège de repos si les tissus mous sont une préoccupation.



Garantie du TCS® Unbreakable™

GARANTIE À VIE CONTRE LA CASSE

Des **tests approfondis** et un **historique clinique** ont prouvé que les prothèses TCS® Unbreakable™ ne se casseront pas lorsqu'elles sont utilisées de manière adéquate.

TCS France garantit à vie le TCS® Unbreakable™ contre la casse ou la fracture due aux défauts du matériau.

La garantie ne couvre pas les dents artificielles, ni la liaison entre les dents artificielles et le TCS® Unbreakable™.



UNIQUEMENT AVEC UN LABORATOIRE CERTIFIÉ TCS FRANCE

tcs France Certificat d'authenticité

Ce certificat d'authenticité vous garantit que votre prothèse dentaire a été réalisée en France avec le matériau TCS® Unbreakable en respectant le protocole de fabrication original.

Nom du patient:	
Date d'insertion:	
Laboratoire dentaire certifié TCS®:	
Projet technique n°:	
Cabinet dentaire:	
Garantie n°:	

* En cas de rupture de votre prothèse TCS®, veuillez contacter la société TCS France au 01.82.28.40.93

Seul un laboratoire certifié TCS France peut délivrer une carte de garantie à vie contre la casse.

Cette carte vous assure une **fabrication Française** ainsi que le respect du protocole de fabrication.

Un sachet de transport et un dépliant patient vous seront remis avec la prothèse.



Un échantillon du nettoyant TCS® Fresh est offert à votre patient.



PREPARATION À LA PREMIÈRE INSERTION

- **Examinez attentivement la prothèse** sur et en dehors du modèle et vérifiez l'axe d'insertion.
- **Immergez** la prothèse TCS[®] Unbreakable™ **dans l'eau très chaude** (70°C) pendant environ **cinq minutes**.
- Le traitement à l'eau chaude permet une insertion initiale plus souple et une bonne adaptation avec les tissus naturels.
- **Insérez-la prothèse délicatement** dans la bouche du patient et procédez aux contrôles d'adaptation.



ADAPTEZ LA PROTHÈSE DÈS LA PREMIÈRE INSERTION

Il est essentiel de procéder aux **contrôles** suivants lors de la première insertion de la prothèse:

- **Vérifier l'occlusion** et corrigez la en conséquence.
- **Réduire la limite vestibulaires** en conséquence.

Si le patient reste mal à l'aise à cause de la compression du **crochet**, ce dernier peut être légèrement **déserré** en l'immergeant dans de l'eau chaude (70°C) durant 5 min. Cela activera les **caractéristiques thermoformables** du matériau.

Puis courber le crochet vers l'extérieur. Il est aussi possible de resserrer le crochet en suivant la même technique en courbant le crochet vers l'intérieur.



Adjonctions & Rebasage

ADJONCTIONS DE DENTS ET CROCHETS

Voici le protocole à suivre:

- Assurez-vous de débarasser la prothèse de toute pâte ou d'adhésif avant la prise d'empreinte.
- Une empreinte en alginate est prise avec la prothèse dans la bouche.
- Retirez l'empreinte de la bouche, la prothèse y étant incluse.
- Assurez-vous que la prothèse est correctement capturée dans le matériau de prise d'empreinte.
- Envoyez-la au laboratoire avec les instructions.

Votre laboratoire procédera à une nouvelle injection de TCS® pour assurer une fusion au niveau de la réparation.

REBASAGE

Voici le protocole à suivre:

- Une empreinte à base de caoutchouc est prise sous la prothèse TCS® avec la bouche fermée.
- Le patient ferme la bouche délicatement pour garantir une bonne occlusion pendant que la base en caoutchouc est en train de se fixer.
- Une fois le matériau à base caoutchouc installé, une empreinte en alginate est prise puis retirée de la bouche avec la prothèse et la base en place.
- Examinez attentivement la prothèse pour vous assurer qu'elle est convenablement installée dans le matériau en alginate.
- Envoyez-la au laboratoire avec les instructions.

Dans la plupart des cas où un rebasage complet est requis, la prothèse amovible est insérée dans une nouvelle base.



CONSEIL: N'utilisez pas les outils normalement utilisés pour les prothèses amovibles conventionnelles qui sont inefficaces sur les TCS[®] Unbreakable[™].

TECHNIQUE: Réglez votre outil manuel à basse vitesse (< 10000 tr/min). Utilisez des mouvements de grattage allers retours légers et rapides pour réduire la surface. Assurez vous de maintenir la fraise en mouvement constant. N'appliquez pas une pression excessive car cela pourrait brûler ou déformer la prothèse. Renvoyez la prothèse au laboratoire pour de grands ajustements.

MATÉRIEL: Les cônes verts sont idéals pour les petits ajustements. Les cônes en caoutchouc marron sont utilisés pour le lissage et le lustrage. Le couteau à lame courbée TCS[®] permettra de retirer les ébarbures restantes.



Contactez notre service technique pour toute question relative à un appareil TCS[®] Unbreakable[™]
01.82.28.40.93 ou contact@tcsfrance.com

Kits d' Ajustements

Avec la facilité d'utilisation de nos Kits de retouches au fauteuil, plus besoin de renvoyer vos prothèses à votre laboratoire. Gagnez du temps pour le confort de vos patients.

Kit de retouches et de polissage

1 Fraise en carbure 1 Pierre montée verte 2 Pointes en caoutchoucs



Spécialement conçues pour découper les matériaux thermoplastiques.



Idéale pour les petits ajustements au fauteuil.



Petit et grand cônes caoutchouc, idéals pour les ajustements au fauteuil.

5 TCS® Rag Buff



3 Brosses pour obtenir la douceur nécessaire au polissage du TCS® Unbreakable.

5 TCS® Fuzz Buff



3 brosses de haute fusion pour un ponçage du TCS® Unbreakable.

1 Pâte ultra brillance bleue



Pâte de polissage pour une ultra-brillance du TCS® Unbreakable.

1 Couteau Courbé TCS®



Instrument qui permettra de retirer les ébarbures restantes.

Kit de rebasage provisoire en base molle



Ce kit inclut les outils essentiels pour réaliser le rebasage provisoire **directement au fauteuil**.
Idéal pour les prothèses provisoires avant implant.

Caractéristiques du kit:

- Environ 10 rebasages
- Facilité d'utilisation
- Compatible tous Nylons



Contactez nous pour toute commande de kits d'ajustements
01.82.28.40.93 ou contact@tcsfrance.com



Entretien des Prothèses TCS®

Pour toujours faire apparaître comme neuf le TCS® Unbreakable™, veuillez conseiller vos patients à suivre les simples recommandations suivantes:

- 1 -** Nettoyer chaque jour l'appareil. Le rincer avec de l'eau courante pour retirer toutes les particules de nourriture.
- 2 -** Avec la brosse à dents adaptée, brosser la prothèse avec de l'eau courante puis rincer à nouveau.
- 3 -** Placer l'appareil dans un bac à ultrason ou un récipient rempli d'une solution nettoyante TCS Fresh® Denture Cleaner pendant 15min.
- 4 -** Rincer sous l'eau avec la brosse à dents adaptée et remettre l'appareil en bouche.

Il est recommandé de laisser la prothèse dans de l'eau ou dans le TCS Fresh® Denture Cleaner lorsqu'elle n'est pas portée.

NE PAS UTILISER d'agent de blanchiment, de dentifrice ou de produits de nettoyage similaires car ces derniers peuvent rayer ou décolorer la surface de la prothèse.

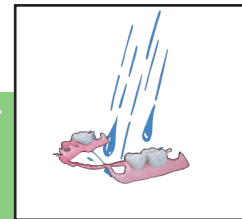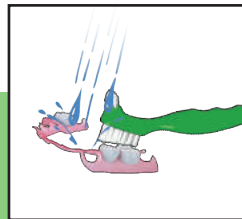

Retrouvez l'ensemble des produits TCS[®] Fresh sur notre site Internet
www.tcsfrance.com/boutique



TCS Fresh[®] Denture Cleaner *(Réf. 4505-01, 24 par boîte)*

Nettoyant vivement recommandé pour l'entretien du TCS[®] Unbreakable. Élimine, en toute sécurité, les tâches de café, de thé, de tabac, le tartre, la plaque et le calcaire.

Utilisé quotidiennement, il permet de maintenir l'appareil dentaire comme neuf.



TCS Fresh[®] Spray Mentholé *(Réf. 4504/PY-01, 28ml)*

Permet de rafraîchir la prothèse TCS[®] grâce à sa formule mentholée. Souvent utilisé par le chirurgien dentiste avant une première insertion.



TCS Fresh[®] Brosse à dents *(Réf. 4013-01, à l'unité)*

Idéal pour nettoyer efficacement les prothèses TCS[®] Unbreakable. Cette brosse ultra souple permet d'éliminer les aliments, le tartre et la plaque dentaire sans rayer la surface de l'appareil. Nous déconseillons l'utilisation de brosse à dents classique.



 01.82.28.40.93

contact@tcsfrance.com | www.tcsfrance.com

14 rue du bois de Montmarre
91640 Janvry

